

# WOLK

## INSTRUCTIES



Scan de QR-code om alle instructies en video's online te raadplegen of ga naar [wolkairbag.com/instructies](https://www.wolkairbag.com/instructies)

Dit instructieboekje bevat alle instructies voor de Wolk heupairbag. Wij adviseren deze instructies zorgvuldig door te lezen voor een optimaal gebruik. Alle instructies zijn ook online te raadplegen via [wolkbairbag.com/instructies](https://wolkbairbag.com/instructies)

Dit boekje bevat instructies voor zowel de Wolk Belt als de Wolk Shorts. Linksboven op elke pagina is door middel van een icoon duidelijk aangegeven voor welke heupairbag de instructie van toepassing is.

Om snel en eenvoudig te starten met de Wolk heupairbag hebben we de belangrijkste instructies opgenomen in twee 'snel aan de slag'-video's. Gebruik de QR-code of de link om de video direct te bekijken.




Scan de QR-code voor de 'snel aan de slag'-video van de **Wolk Belt** of ga naar [wolkbairbag.com/belt-snelstart](https://wolkbairbag.com/belt-snelstart)




Scan de QR-code voor de 'snel aan de slag'-video van de **Wolk Shorts** of ga naar [wolkbairbag.com/shorts-snelstart](https://wolkbairbag.com/shorts-snelstart)

## Wolk Belt

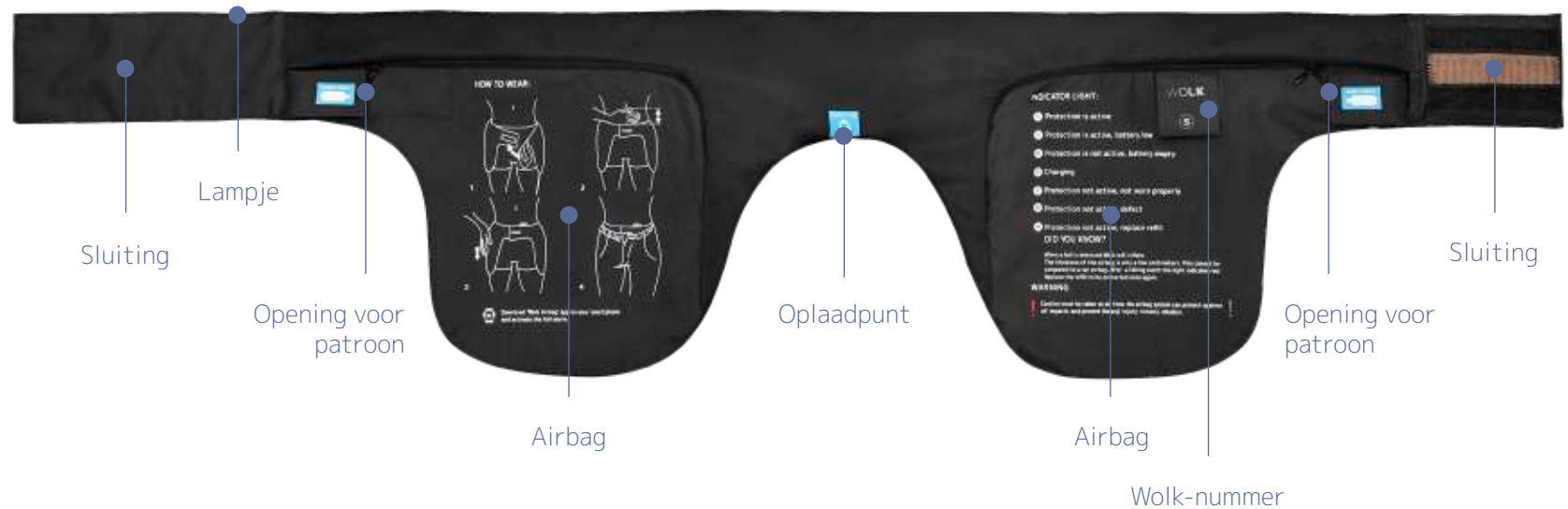


## Wolk Shorts

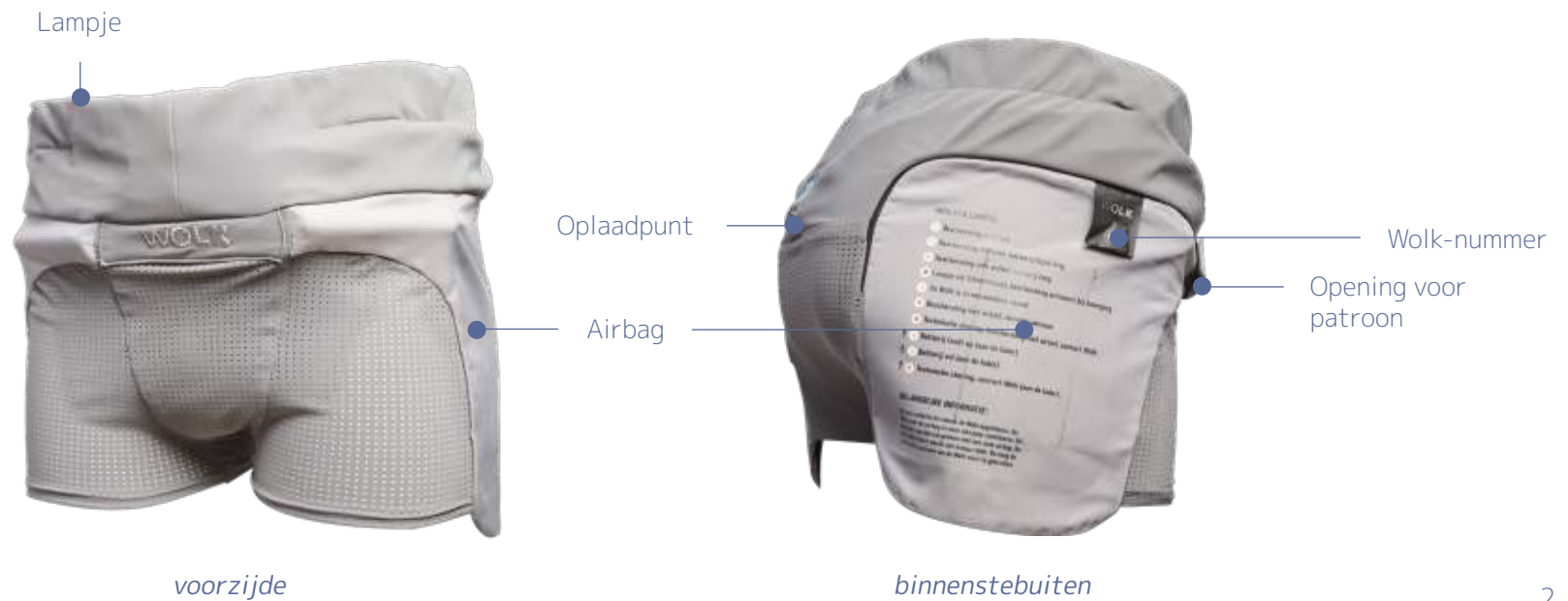


voorzijde


binnenstebuiten

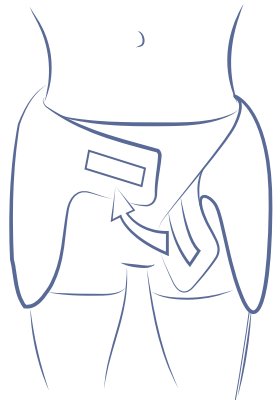

1.

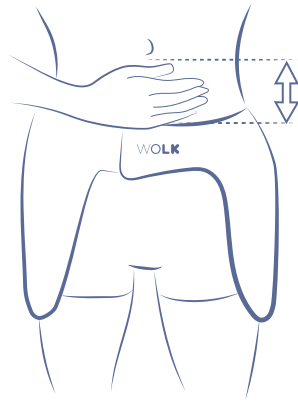

2.

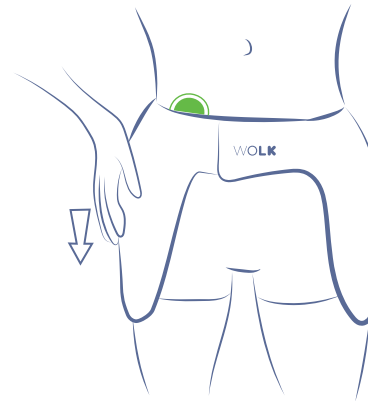

3.



4.

1. Plaats de Wolk over of onder het ondergoed. Sluit het klittenband aan de voorkant. De heupairbag dient altijd onder de kleding gedragen te worden voor optimale bescherming.
2. Zorg dat de sluiting een handbreedte onder de navel zit.
3. Zorg dat de airbags goed naar beneden blijven zitten bij het aankleden.
4. Controleer of het lampje **groen** brandt, dan is de bescherming actief. Let op! Dit is afhankelijk van de elektronica-versie, zie hiervoor de uitleg van het lampje.

Er zijn 4 verschillende maten: S, M, L en XL. De maat wordt bepaald door de omvang op de blote huid te meten circa 1 handbreedte onder de navel.

S: 84 tot 94 cm / M: 95 tot 103 cm

L: 104 tot 111 cm / XL: 112 tot 125 cm

### Let op!

- Laat de Wolk geopend wanneer deze niet gedragen wordt om onnodige activatie te voorkomen!
- De airbags dienen meer naar achteren dan naar voren te zitten. Een heup breekt men voornamelijk door opzij of schuin naar achteren te vallen.



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar [wolkairbag.com/belt-gebruik](http://wolkairbag.com/belt-gebruik)



Let op! Er zijn 2 verschillende software-versies in omloop van de Wolk Belt. De versies hebben invloed op de werking van het lampje.

- **Versie 1** (software 26 in het dashboard): Het lampje gaat branden wanneer het klittenband van de Wolk gesloten wordt.
- **Versie 2** (software 4 of hoger in dashboard): Het lampje brandt bij gebruik van de Wolk en gaat uit als de batterij leeg is of als de Wolk 4 uur niet gebruikt wordt. Dit om energie te besparen.

De verdere werking van het lampje is hetzelfde.

- **Groen:**
  - Bij het dragen: de bescherming is actief.
  - Bij het opladen: de batterij is vol.
- **Oranje:** de batterij is aan het opladen.
- ☀️ **Oranje knipperend:** de heupairbag is in wasmachine-stand.

☀️ **Oranje/groen knipperend:** de bescherming is actief, maar de batterij is bijna leeg. Laad tijdig de batterij op.


☀️ **Rood/oranje knipperend:**

- Bij het dragen: de bescherming is niet actief, de batterij is leeg. Laad de batterij op.
- Bij het opladen: er is een technische storing. Neem contact op met Wolk.


● **Rood:**

- Bij het dragen: de bescherming is niet actief. Er heeft een activatie plaats gevonden. Vervang het airbagpatroon.
- Bij het opladen: er is een technische storing. Neem contact op met Wolk.


☀️ **Rood knipperend:** de bescherming is niet actief. Er is sprake van een technische storing. Neem contact op met Wolk.

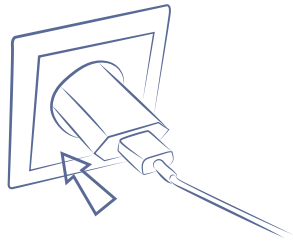


1.

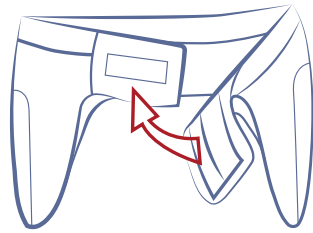


2.

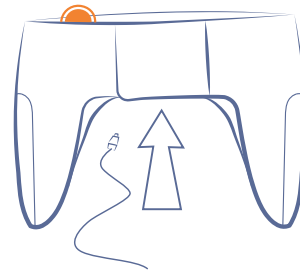

3.

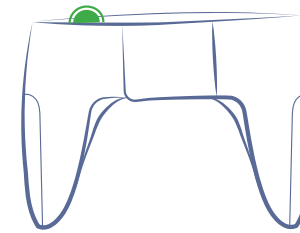

4.

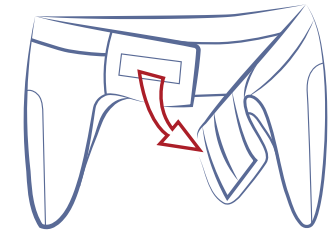

5.

Als het lampje **groen/oranje** knippert dan is de batterij nog half vol. Als het lampje **rood/oranje** knippert is de batterij leeg en is de bescherming niet meer actief.

De Wolk is na circa 3 tot 4 uur volledig opgeladen. Langer opladen dan vier uur is niet schadelijk voor de heupairbag.

NB. Indien er een software-update beschikbaar is wordt deze automatisch uitgevoerd tijdens het opladen, mits de heupairbag gesloten is.

## De Wolk opladen

1. Stop de meegeleverde oplader in het stopcontact.
2. Sluit de heupairbag door middel van het klittenband.
3. Plaats de kleine stekker van de oplader in het oplaadpunt. Deze bevindt zich in het midden van de Wolk. Het lampje brandt **oranje**. *In het geval van een magnetische oplader is het insteken niet meer nodig. Houd de kabel in de buurt van het oplaadpunt, zodat deze automatisch gekoppeld wordt.*
4. Het lampje brandt **groen** wanneer de batterij volledig is opgeladen.
5. Haal de oplader uit het oplaadpunt en open de heupairbag. Laat de Wolk geopend wanneer deze niet gedragen wordt om onnodige activatie te voorkomen!




Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar [wolkairbag.com/belt-opladen](http://wolkairbag.com/belt-opladen)




De Wolk activeert alleen bij een zijwaartse val (op de heup). Bij een val naar voren of naar achteren zal de heupairbag niet activeren.

Na een val (en een activatie) biedt de Wolk geen bescherming. Het gebruikte patroon moet vervangen worden. Raadpleeg hiervoor de specifieke instructies.

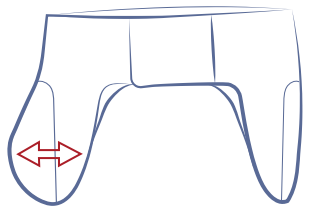

### Hoe dik wordt de airbag?


De airbag wordt slechts 4-5 cm dik. Je ziet er weinig van en de kleding blijft gewoon heel.

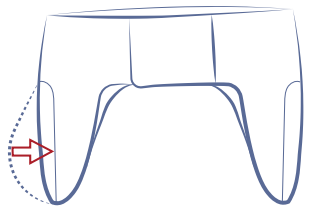

### Wat gebeurt er na een val?


De airbag loopt na het opvangen van de val direct leeg en neemt dezelfde vorm aan als voor de val.

Een activatie is op de volgende manieren te herkennen:

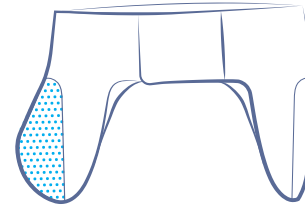


### De airbag voelt koud aan

Als de airbag zich opblaast voelt deze koud aan door de koude lucht uit het patroon.

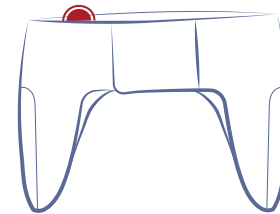

### Het lampje brandt rood

Na een val en activatie van één van de airbags brandt het lampje **rood**.

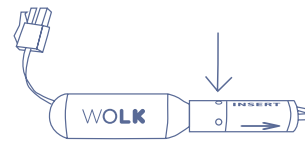

### Slagpinnetje zichtbaar

Bij het geactiveerde patroon is het slagpinnetje zichtbaar door het gaatje in het patroon.

Ook in het **dashboard** is te zien dat er een activatie heeft plaatsgevonden. Bekijk het dashboard via [cloudairbag.com](https://cloudairbag.com).




Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar [wolkairbag.com/belt-activatie](https://wolkairbag.com/belt-activatie)




# PATROON VERVANGEN - WOLK BELT


1. Open het klittenband van de patroon-  
ingang.
2. Ontkoppel het klipje van het patroon door  
de zijkant van het klipje in te drukken. Deze  
is te vinden onder de stof. Duw het patroon  
uit de patrooningang (het gebruikte  
patroon mag bij het restafval).
3. Pak een nieuw patroon en let op de juiste  
maat. Deze staat op de sticker. Schuif het  
nieuwe patroon met de richting van de pijl  
in de patrooningang.
4. Sluit het klittenband van de patrooningang.  
Koppel het klipje aan het patroon en plaats  
deze terug onder de stof.
5. Sluit de Wolk en controleer of het lampje  
**groen** brandt, dan is de bescherming  
opnieuw actief.

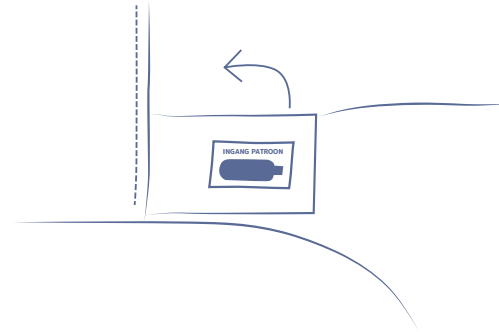


1.

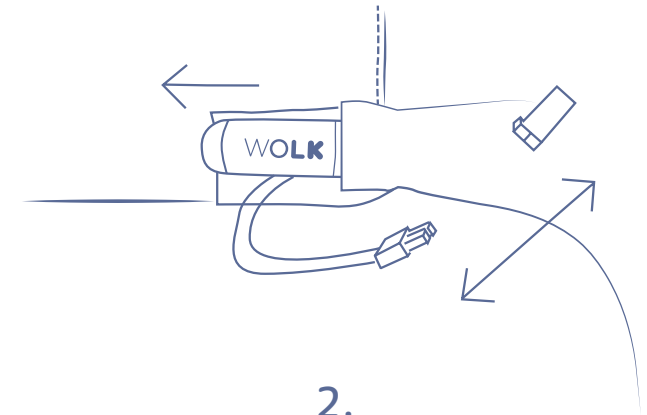

2.

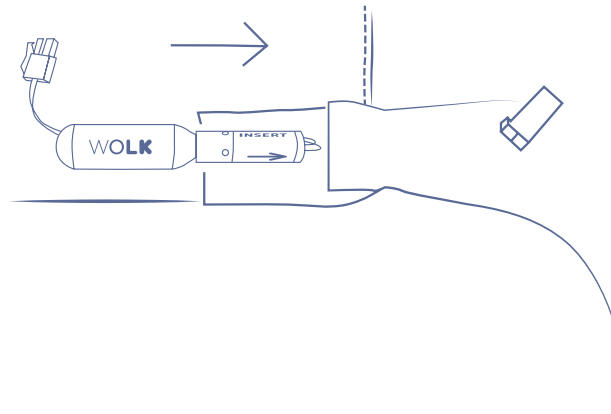

3.

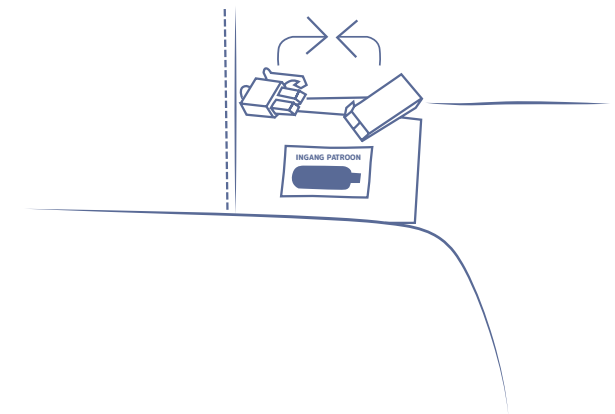


4.




Scan de QR-code voor een  
instructievideo of ga naar  
[wolkairbag.com/belt-patroon](http://wolkairbag.com/belt-patroon)



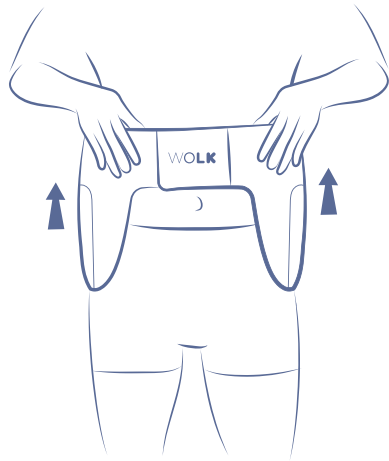


### Optie 1

Schuif de Wolk omhoog. De heupairbag kan gesloten blijven. Schuif de Wolk na de toiletgang weer omlaag.

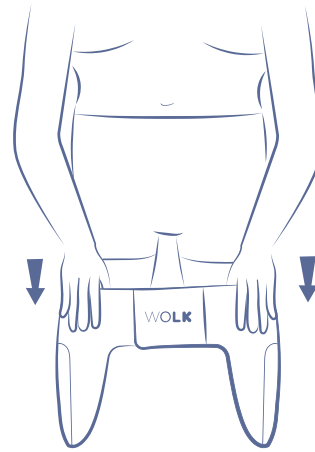

### Optie 2

Schuif de Wolk omlaag, net als het ondergoed. De heupairbag kan gesloten blijven. Schuif de Wolk na de toiletgang weer omhoog.

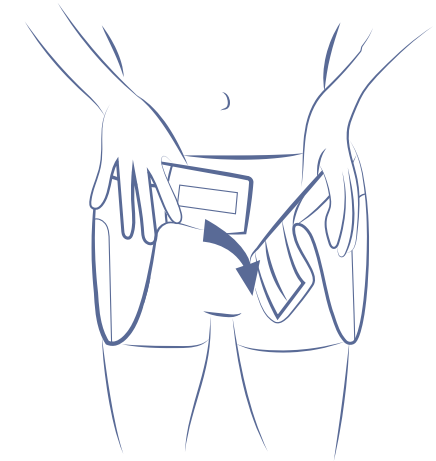

### Optie 3

Maak het klittenband los en doe de Wolk af. Doe hem na de toiletgang weer om en sluit het klittenband.

### Controleer de Wolk na de toiletgang

- Let in alle gevallen op dat de airbags goed naar beneden blijven zitten bij het aankleden.
- Brandt het lampje **groen**? Dan is de bescherming actief.




Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar [wolkairbag.com/belt-toilet](http://wolkairbag.com/belt-toilet)



# WASVOORSCHRIFT - WOLK BELT

WOLK

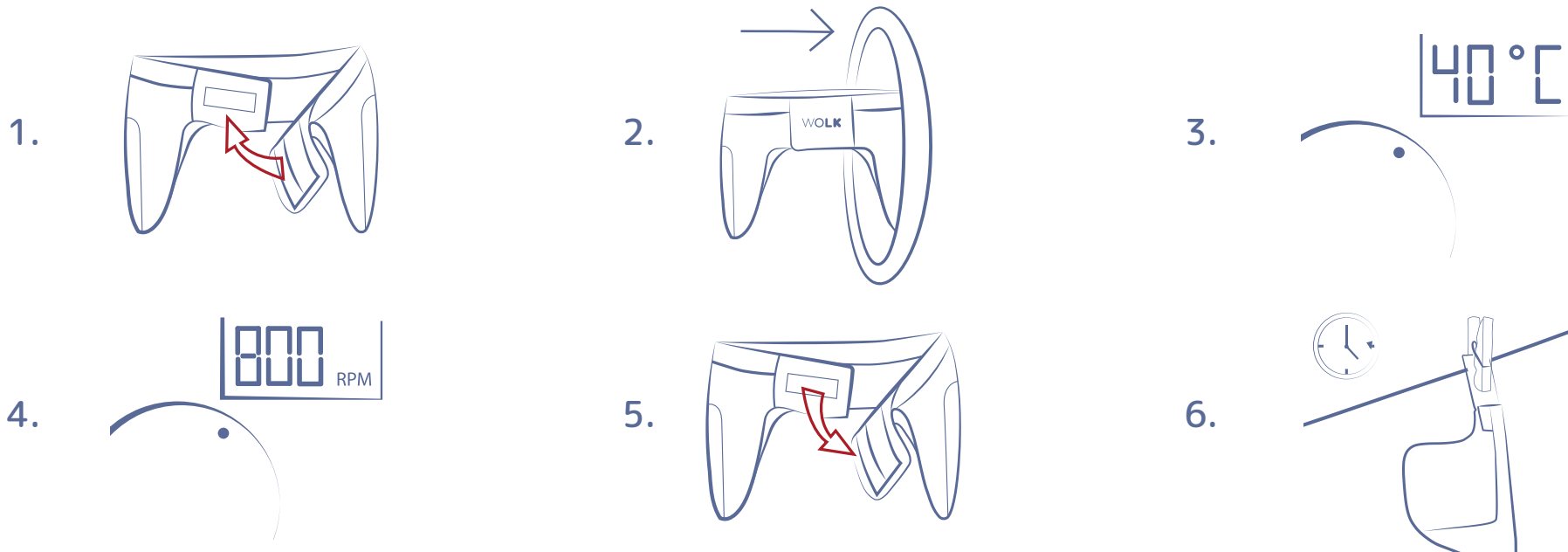

## De Wolk kan in zijn geheel in de wasmachine. Verwijder hierbij géén onderdelen!

1. Sluit de Wolk door middel van het klittenband om onnodige activiteiten te voorkomen. *Let op! Bij gebruik van een magnetische oplader moet het opzetstukje uit de Wolk verwijderd worden voor het wassen.*
2. Plaats de Wolk in de wasmachine.
3. Stel een wasprogramma in op maximaal 40°C.
4. En centrifugeer op maximaal 800 toeren.

Bij het starten van het wasprogramma gaat de Wolk in de wasmachine stand en **knippert** het lampje **oranje**.

5. Haal de Wolk uit de wasmachine. Laat de Wolk geopend wanneer deze niet gedragen wordt om onnodige activatie te voorkomen!
6. Hang de Wolk geopend te drogen.



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar [wolkairbag.com/belt-wassen](http://wolkairbag.com/belt-wassen)

Het wasvoorschrift bevindt zich ook op het label van de heupairbag.



Alle instructies zijn online te raadplegen.  
Scan de QR-code voor alle instructies en  
instructievideo's of ga naar  
**[wolkairbag.com/instructies](https://wolkairbag.com/instructies)**

Heb je vragen over de Wolk heupairbag of is er een  
probleem? Neem dan contact op met de Wolk klantenservice

Telefoon: **085 - 060 55 56**  
ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

E-mail: **[klantenservice@wolkairbag.com](mailto:klantenservice@wolkairbag.com)**

**WOLK**

WOLK HEUPAIRBAG | [WOLKAIRBAG.COM](http://WOLKAIRBAG.COM)