




1.

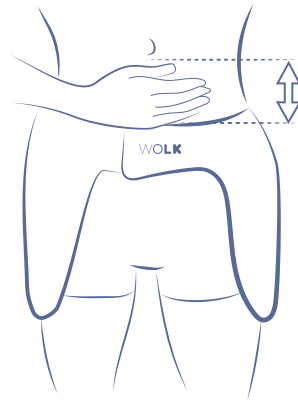

2.

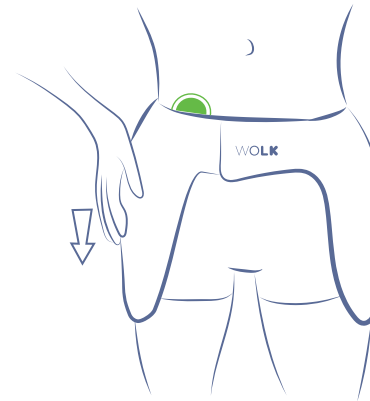

3.

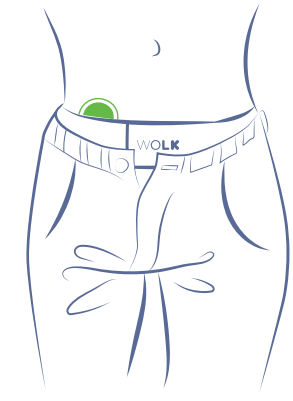

4.

1. Plaats de Wolk over of onder het ondergoed. Sluit het klittenband aan de voorkant. De heupairbag dient altijd onder de kleding gedragen te worden voor optimale bescherming.
2. Zorg dat de sluiting een handbreedte onder de navel zit.
3. Zorg dat de airbags goed naar beneden blijven zitten bij het aankleden.
4. Controleer of het lampje **groen** brandt, dan is de bescherming actief. Let op! Dit is afhankelijk van de elektronica-versie, zie hiervoor de uitleg van het lampje.

Er zijn 4 verschillende maten: S, M, L en XL. De maat wordt bepaald door de omvang op de blote huid te meten circa 1 handbreedte onder de navel.

S: 84 tot 94 cm / M: 95 tot 103 cm

L: 104 tot 111 cm / XL: 112 tot 125 cm

### Let op!

- Laat de Wolk geopend wanneer deze niet gedragen wordt om onnodige activatie te voorkomen!
- De airbags dienen meer naar achteren dan naar voren te zitten. Een heup breekt men voornamelijk door opzij of schuin naar achteren te vallen.



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar [wolkairbag.com/belt-gebruik](http://wolkairbag.com/belt-gebruik)