



### Optie 1

Schuif de Wolk omhoog. De heupairbag kan gesloten blijven. Schuif de Wolk na de toiletgang weer omlaag.

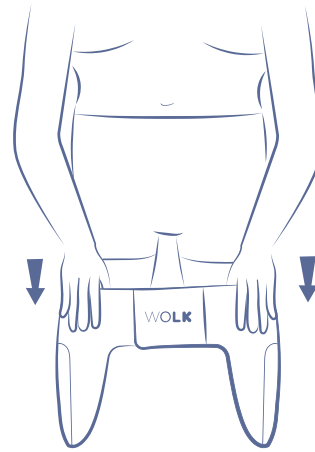

### Optie 2

Schuif de Wolk omlaag, net als het ondergoed. De heupairbag kan gesloten blijven. Schuif de Wolk na de toiletgang weer omhoog.

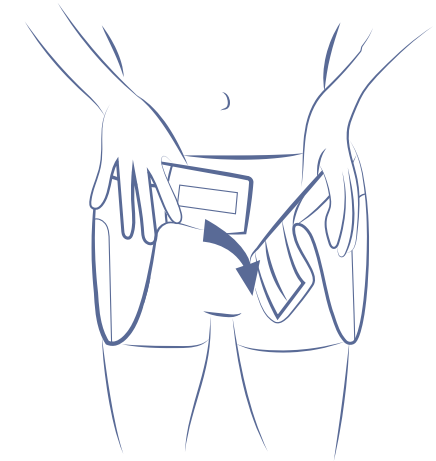

### Optie 3

Maak het klittenband los en doe de Wolk af. Doe hem na de toiletgang weer om en sluit het klittenband.

### Controleer de Wolk na de toiletgang

- Let in alle gevallen op dat de airbags goed naar beneden blijven zitten bij het aankleden.
- Brandt het lampje **groen**? Dan is de bescherming actief.



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar [wolkairbag.com/belt-toilet](http://wolkairbag.com/belt-toilet)