

WOLK

INSTRUCTIES



Scan de QR-code om alle instructies en video's online te raadplegen of ga naar [wolkairbag.com/instructies](https://www.wolkairbag.com/instructies)

Dit instructieboekje bevat alle instructies voor de Wolk heupairbag. Wij adviseren deze instructies zorgvuldig door te lezen voor een optimaal gebruik. Alle instructies zijn ook online te raadplegen via wolkbairbag.com/instructies

Dit boekje bevat instructies voor zowel de Wolk Belt als de Wolk Shorts. Linksboven op elke pagina is door middel van een icoon duidelijk aangegeven voor welke heupairbag de instructie van toepassing is.

Om snel en eenvoudig te starten met de Wolk heupairbag hebben we de belangrijkste instructies opgenomen in twee 'snel aan de slag'-video's. Gebruik de QR-code of de link om de video direct te bekijken.




Scan de QR-code voor de 'snel aan de slag'-video van de **Wolk Belt** of ga naar wolkbairbag.com/belt-snelstart




Scan de QR-code voor de 'snel aan de slag'-video van de **Wolk Shorts** of ga naar wolkbairbag.com/shorts-snelstart

Wolk Belt

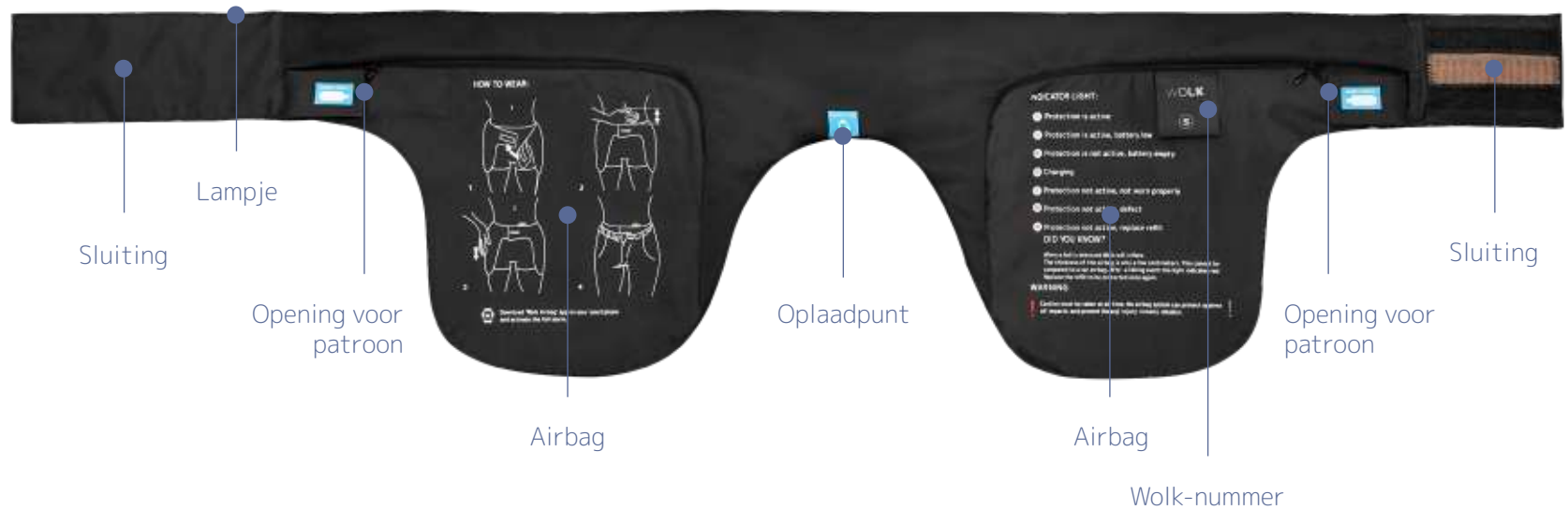


Wolk Shorts

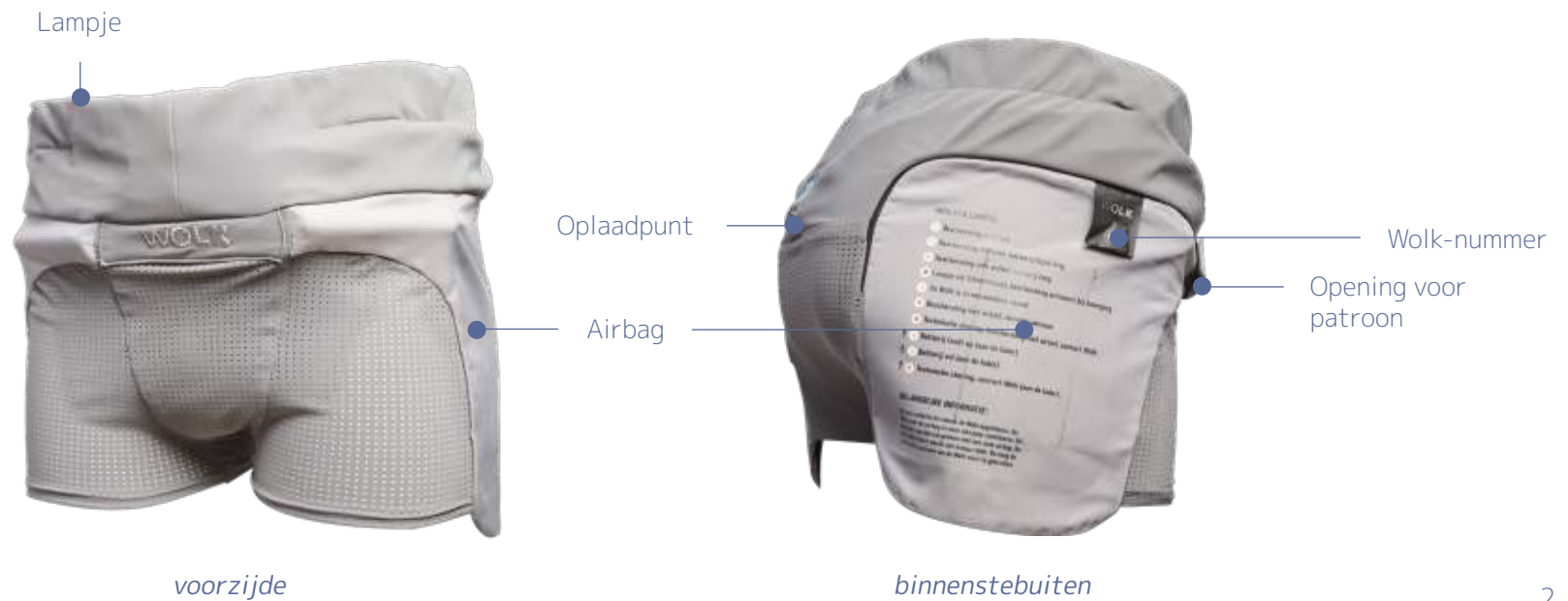




IN GEBRUIK NEMEN & MAATVOERING - WOLK SHORTS

WOLK

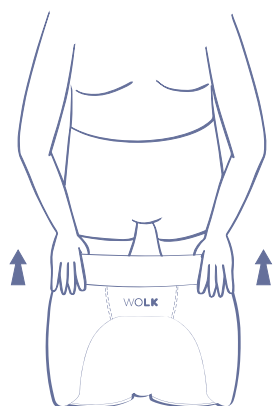

1.

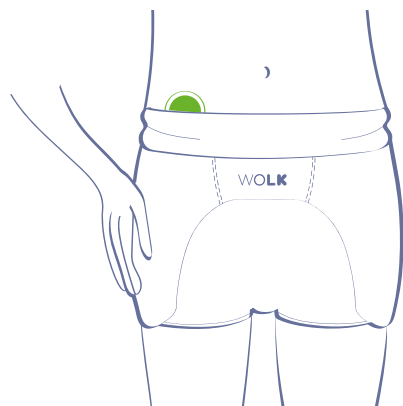

2.



3.

1. Trek de Wolk aan over of onder het ondergoed. Zorg dat de heupairbag altijd onder de rest van de kleding wordt gedragen voor optimale bescherming.
2. Zorg ervoor dat het Wolk logo aan de voorkant zit. Door de comfortabele pasvorm zit de heupairbag direct goed. De Wolk gaat automatisch aan.
3. Controleer of het lampje **groen** brandt, dan is de bescherming actief. Brandt het lampje niet? Leg de Wolk dan even aan de oplader.

Er zijn 4 verschillende maten: S, M, L en XL. De maat wordt bepaald door de omvang op de blote huid te meten circa 1 handbreedte onder de navel.

S: 84 tot 94 cm

M: 95 tot 103 cm

L: 104 tot 111 cm

XL: 112 tot 125 cm



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/shorts-gebruik



UITLEG LAMPJE - WOLK SHORTS

WOLK

Let op! Het lampje brandt bij gebruik van de Wolk en gaat uit als de batterij leeg is of als de Wolk 4 uur niet gebruikt wordt. Brandt het lampje niet? Leg de Wolk dan even aan de oplader.

● **Groen:**

- Bij het dragen: de bescherming is actief.
- Bij het opladen: de batterij is vol.

● **Oranje:** de batterij is aan het opladen.

☀ **Oranje knipperend:** de heupairbag is in wasmachine-stand.

☀ **Oranje/groen knipperend:** de bescherming is actief, maar de batterij is bijna leeg. Laad tijdig de batterij op.


☀ **Rood/oranje knipperend:**

- Bij het dragen: de bescherming is niet actief, de batterij is leeg. Laad de batterij op.
- Bij het opladen: er is een technische storing. Neem contact op met Wolk.

● **Rood:**

- Bij het dragen: de bescherming is niet actief. Er heeft een activatie plaats gevonden. Vervang het airbagpatroon.
- Bij het opladen: er is een technische storing. Neem contact op met Wolk.

☀ **Rood knipperend:** de bescherming is niet actief. Er is sprake van een technische storing. Neem contact op met Wolk.

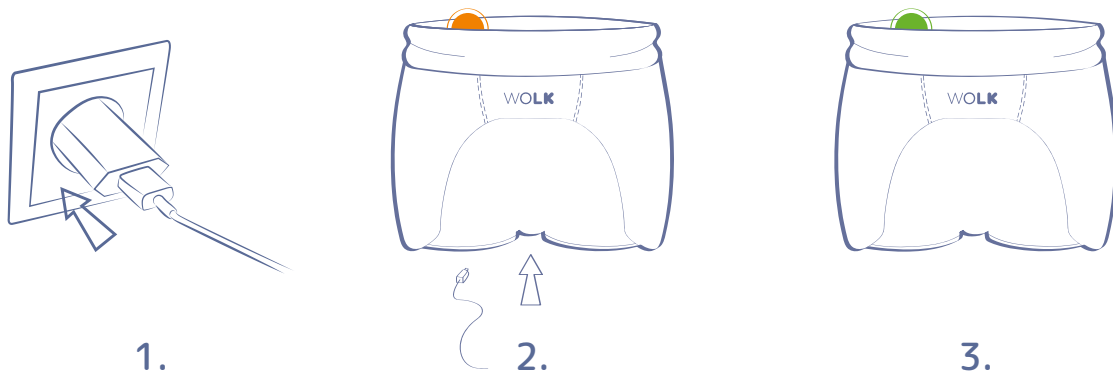

Als het lampje **groen/oranje** knippert dan is de batterij nog half vol. Als het lampje **rood/oranje** knippert is de batterij leeg en is de bescherming niet meer actief.

De Wolk is na circa 3 tot 4 uur volledig opgeladen. Langer opladen dan vier uur is niet schadelijk voor de heupairbag.

NB. Indien er een software-update beschikbaar is wordt deze automatisch uitgevoerd tijdens het opladen.

De Wolk opladen

1. Stop de meegeleverde oplader in het stopcontact.
2. Plaats de kleine stekker van de oplader in het oplaadpunt. Deze bevindt zich in het midden van de Wolk. Het lampje brandt **oranje**. *In het geval van een magnetische oplader is het insteken niet meer nodig. Houd de kabel in de buurt van het oplaadpunt, zodat deze automatisch gekoppeld wordt.*
3. Het lampje brandt **groen** wanneer de batterij volledig is opgeladen.



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/shorts-opladen




INFORMATIE OVER EEN ACTIVATIE - WOLK SHORTS

WOLK

De Wolk activeert alleen bij een zijwaartse val (op de heup). Bij een val naar voren of naar achteren zal de heupairbag niet activeren.

Na een val (en een activatie) biedt de Wolk geen bescherming. Het gebruikte patroon moet vervangen worden. Raadpleeg hiervoor de specifieke instructies.

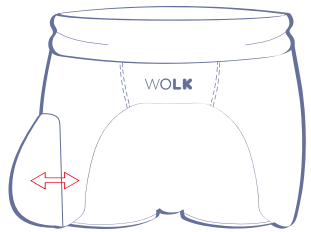

Hoe dik wordt de airbag?


De airbag wordt slechts 4-5 cm dik. Je ziet er weinig van en de kleding blijft gewoon heel.



Wat gebeurt er na een val?


De airbag loopt na het opvangen van de val direct leeg en neemt dezelfde vorm aan als voor de val.

Een activatie is op de volgende manieren te herkennen:

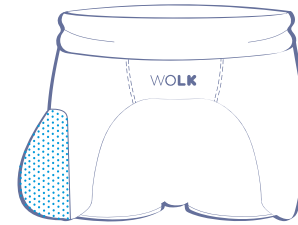


De airbag voelt koud aan

Als de airbag zich opblaast voelt deze koud aan door de koude lucht uit het patroon.

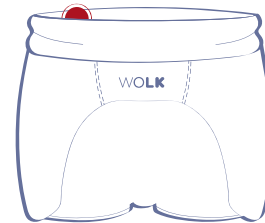

Het lampje brandt rood

Na een val en activatie van één van de airbags brandt het lampje **rood**.

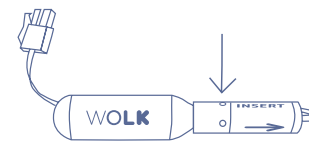

Slagpinnetje zichtbaar

Bij het geactiveerde patroon is het slagpinnetje zichtbaar door het gaatje in het patroon.

Ook in het **dashboard** is te zien dat er een activatie heeft plaatsgevonden. Bekijk het dashboard via cloudairbag.com.




Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/shorts-activatie




PATROON VERVANGEN - WOLK SHORTS

WOLK


1. Open het klittenband van de patrooningang.
2. Ontkoppel het klipje van het patroon door de zijkant van het klipje in te drukken. Deze is te vinden onder de stof. Duw het patroon uit de patrooningang (de gebruikte patroon mag bij het restafval).
3. Pak een nieuw patroon en let op de juiste maat. Deze staat op de sticker. Schuif het nieuwe patroon met de richting van de pijl in de patrooningang.
4. Sluit het klittenband van de patrooningang. Koppel het klipje aan het patroon en plaats deze terug onder de stof.
5. Controleer of het lampje **groen** brandt, dan is de bescherming opnieuw actief.

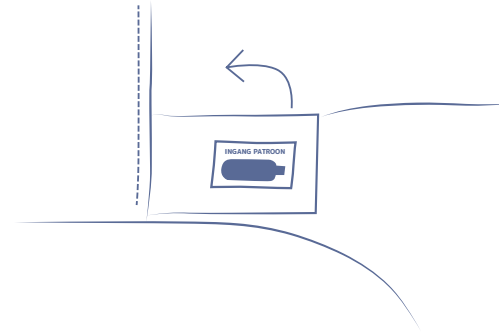


1.

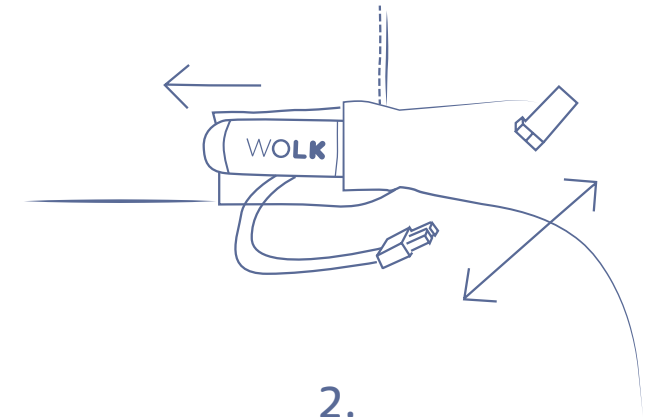

2.

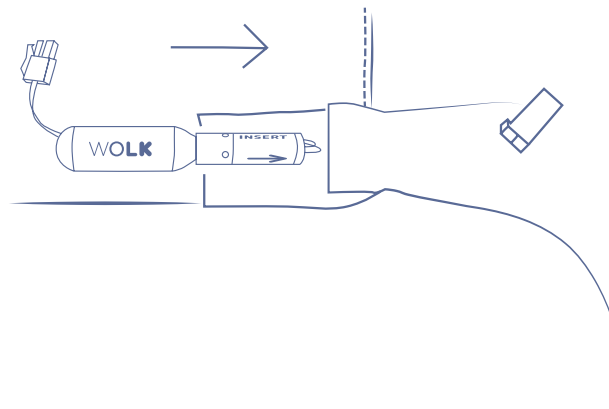


3.

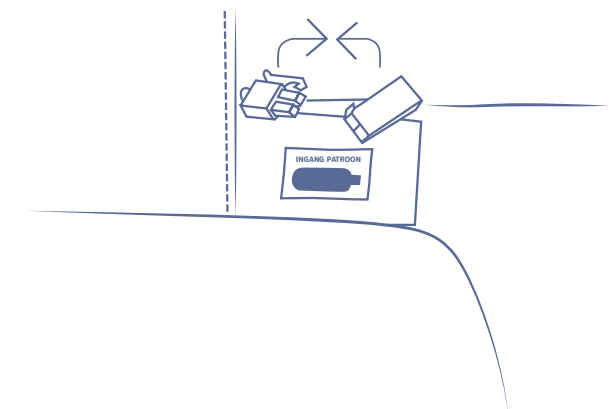


4.



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/shorts-patroon

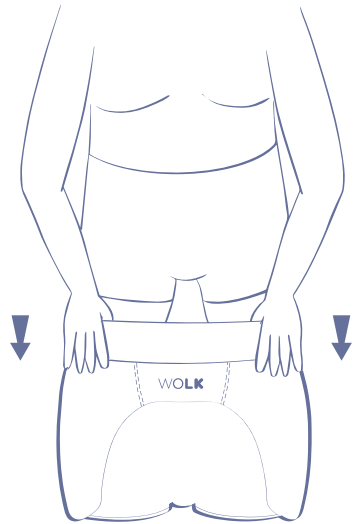

1.

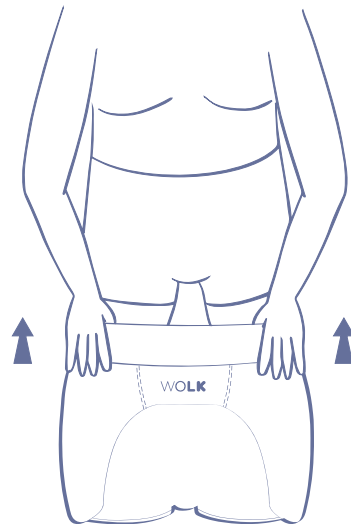

2.

Toiletgang

1. Schuif de Wolk omlaag, net als het ondergoed.
2. Schuif de heupairbag na de toiletgang weer omhoog.

Controleer de Wolk na de toiletgang

- Door de comfortabele pasvorm zit de Wolk direct goed.
- Brandt het lampje **groen**? Dan is de bescherming actief.




Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/shorts-toilet



WASVOORSCHRIFT - WOLK SHORTS

WOLK

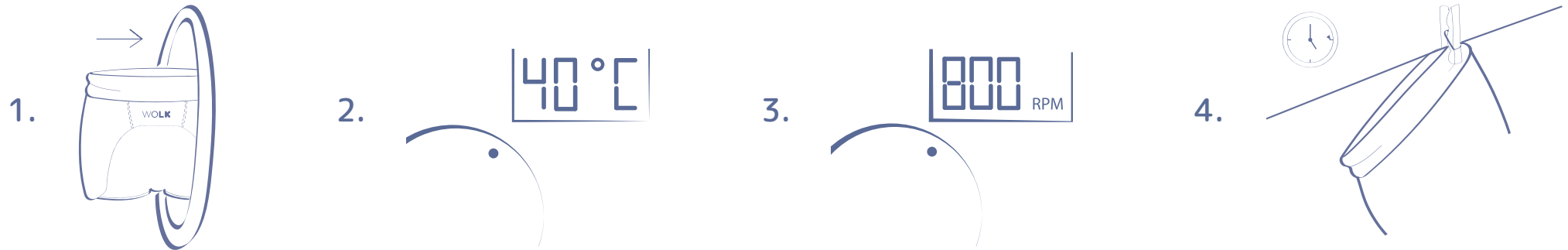

De Wolk kan in zijn geheel in de wasmachine. Verwijder hierbij géén onderdelen!

1. Plaats de Wolk in de wasmachine. *Let op! Bij gebruik van een magnetische oplader moet het opzetstukje uit de Wolk verwijderd worden voor het wassen.*
2. Stel een wasprogramma in op maximaal 40° C.
3. En centrifugeer op maximaal 800 toeren. Bij het starten van het wasprogramma gaat de Wolk in de wasmachine stand en **knippert** het lampje **oranje**.
4. Haal de Wolk uit de wasmachine en hang de heupairbag te drogen.

Het wasvoorschrift bevindt zich ook op het label van de heupairbag.



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/shorts-wassen



Alle instructies zijn online te raadplegen.
Scan de QR-code voor alle instructies en
instructievideo's of ga naar
wolkairbag.com/instructies

Heb je vragen over de Wolk heupairbag of is er een
probleem? Neem dan contact op met de Wolk klantenservice

Telefoon: **085 - 060 55 56**
ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

E-mail: **klantenservice@wolkairbag.com**

WOLK

WOLK HEUPAIRBAG | WOLKAIRBAG.COM