





IN GEBRUIK NEMEN & MAATVOERING - WOLK SHORTS

WOLK

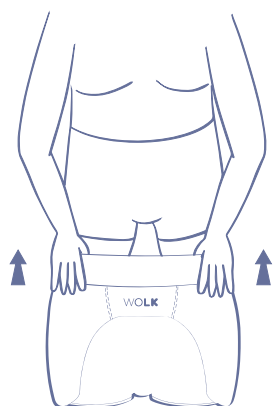

1.

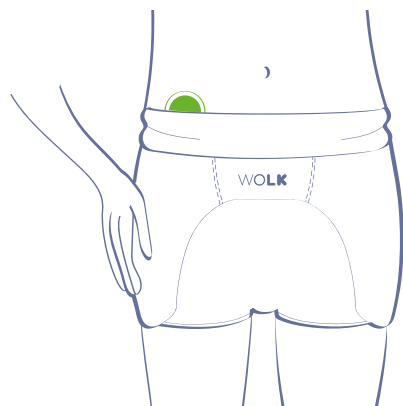

2.



3.

1. Trek de Wolk aan over of onder het ondergoed. Zorg dat de heupairbag altijd onder de rest van de kleding wordt gedragen voor optimale bescherming.
2. Zorg ervoor dat het Wolk logo aan de voorkant zit. Door de comfortabele pasvorm zit de heupairbag direct goed. De Wolk gaat automatisch aan.
3. Controleer of het lampje **groen** brandt, dan is de bescherming actief. Brandt het lampje niet? Leg de Wolk dan even aan de oplader.

Er zijn 4 verschillende maten: S, M, L en XL. De maat wordt bepaald door de omvang op de blote huid te meten circa 1 handbreedte onder de navel.

S: 84 tot 94 cm

M: 95 tot 103 cm

L: 104 tot 111 cm

XL: 112 tot 125 cm



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/shorts-gebruik