

# WIE IS DE WOLK-DRAGER?

Het onderstaande geldt als een richtlijn voor het toekennen van Wolk heupairbags aan cliënten die psychogeriatrische of somatische zorg ontvangen. Uiteindelijk wordt de doorslag gegeven door medewerkers met de meeste cliënt-kennis (zorg, arts en fysio).

## De Wolk-drager

De drager voldoet aan 1 of meerdere van onderstaande omschrijvingen:

- Cliënt die veel loopt / met loopdrang
- Cliënt die valt
- Cliënt met valangst
- Cliënt waarbij de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt overwogen / kan worden terugdraaid

## Tips

- Bekijk de MIC-meldingen om de meest valgevaarlijke cliënten te selecteren
- Start op een PG-afdeling
- Biedt de Wolk op verschillende momenten aan indien de cliënt de Wolk niet accepteert
- Wolk Belt: doorgaans ingezet bij cliënten die regelmatig verschoond moeten worden / niet zelfstandig naar het toilet gaan
- Wolk Shorts: doorgaans ingezet bij cliënten die zelfstandig naar het toilet gaan / in de nacht
- Doet de cliënt de Belt regelmatig onbedoeld af? Probeer eens een Shorts

## Maattabel

Meet de omvang op de blote huid ca. 1 handbreedte onder de navel.

Maat	Omvang
S	84-94 cm
M	95-103 cm
L	104-111 cm
XL	112-125 cm

N.B. Niet de juiste maat?  
Contact de klantenservice om de Wolk te ruilen.