

Is de heupairbag (mogelijk) in aanraking gekomen met:

- een lichaamsvloeistof, zoals urine, bloed of feces?
- micro-organismen, zoals BRMO, MRSA of Noro?

Volg dan de volgende extra stappen:

1. Was de Wolk **2 keer** volgens het gebruikelijke wasvoorschrift (**handwasprogramma maximaal 30°C**).
2. Hang de Wolk te drogen. De heupairbag kan niet in de droger.
3. Spray de Wolk in met **waterstofperoxide 2,5%** (bijv. Wecoline Clean 'n Easy Desinfectiespray) en laat deze opnieuw drogen.

Let op! Is de Wolk gebruikt bij een cliënt met de CPE-bacterie? Neem dan contact op met de klantenservice voor het in zijn geheel vervangen van de heupairbag.

